



Quick Des N / Quick Des N Lemon

Alkoholische Schnelldesinfektion

- Ideal für die sichere Desinfektion in der Routine
- Umfassende, schnelle Wirksamkeit
- Sehr gute Materialverträglichkeit



VAH gelistet*

Präparatetyp

Quick DES N Lemon ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Das Produkt ist insbesondere ideal geeignet für Bereiche im patientennahen Umfeld, in denen ein umfassendes Wirkungsspektrum erforderlich ist. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kürzester Zeit, weist das Produkt eine sehr gute Materialverträglichkeit auf und hinterlässt keine Streifen und Rückstände.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehene des Konzentrates: klare, farblose Lösung
 pH-Wert: 7,0 +/- 1,0
 Flammpunkt: 25°C

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):
 Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patienten-naher Umgebung.

Gemäß EU-Medizinproduktverordnung:
 Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Anwendung

Zur vollständigen Benetzung unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Anwendungshinweise

Quick DES N Lemon kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, da HACCP konform.

Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

bakterizid, levurozid:	2 min*
tuberkulozid:	30 s
mykobakterizid:	1 min
begrenzt viruzid:	30 s
begrenzt viruzid PLUS:	3 min

* gelistet in der 5-Min. Spalte der VAH-Liste

Lieferformen

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Ref.-No.
Duftneutral		
1 Liter Flasche	1 x 1 L	09920-N
5 Liter Flasche	1 x 5 L	09921-N
10 Liter Kanister	1 x 10 L	09922-N
Lemon		
10 Liter Kanister	1 x 10 L	09925-N

Quick Des N: baa: Reg.-Nr. N-97772
Quick Des N Lemon: baa: Reg.-Nr. N-97774

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.



AMPri Handelsgesellschaft mbH
 Benzstr. 16 • 21423 Winsen (Luhe) • Germany
 Tel. +49 (0)4171- 8480-0 • www.ampri.de • info@ampri.de



bioSight GmbH
 Brasselsbergstr. 3 • 34132 Kassel • Tel.: +49 (0)561 81678111